

EPRODAN PARA LARINGOSCÓPIO



SISTEMA DE BARREIRA PARA MATERIAIS DESINFETADOS

EPRODAN PARA LARINGOSCÓPIO

O Eprodan criou um produto exclusivo para proteção de lâminas e cabos de laringoscópios. Um processo rápido e prático que mantém sua função de preservação do sistema de desinfecção de alto nível, protege contra sujidades, umidades e materiais estranhos. Previne recontaminações e contaminações cruzadas dos produtos desinfetados. Com a qualidade Eprodan zelando pela segurança de todos.



- Tamanho para todas as lâminas e cabos
- Tecnologia de filme laminado de 4 camadas, robusto com alta resistência mecânica e 100 % impermeável
- Exclusivo sistema "easy open" que não libera nenhum tipo de resíduo
- Modelos autoselantes
- Modelos termoseláveis (sua selagem pode ser realizada na mesma seladora empregada no CME)



A ESCOLHA CERTA FAZ TODA A DIFERENÇA.

WWW.MEDSTERIL.COM.BR

EPRODAN PARA LARINGOSCÓPIO

EPRODAN[®]
SISTEMA DE BARREIRA PARA MATERIAIS DESINFETADOS

INSTRUÇÃO DE USO :



1. MODELO AUTOSELANTE: possui a dimensão de 100mmx250mm e em uma extremidade com fita adesiva para o seu fechamento.




2. Acondicione o laringoscópio dentro da embalagem de Eprodan.



3. Este tamanho de embalagem é compatível com os laringoscópios de tamanho 1 a 3 e cabo.




4. Retire com cuidado o protetor da fita adesiva.

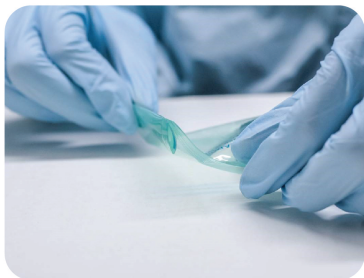

5. Em seguida dobre a ponta com cola no sentido contrário da marca Eprodan, dobre novamente para a cola se fixar na embalagem.



6. Certifique-se de que a embalagem está totalmente fechada. Identifique a embalagem com a data do processamento e a data de validade.

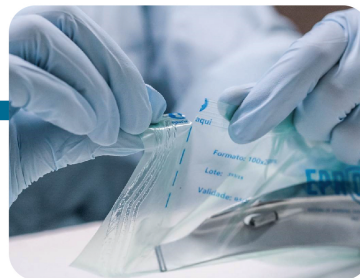

7. Para utilizar a laringoscópio utilize o picote na lateral - sistema de abertura Easy Open, proporciona uma abertura asséptica, não liberando nenhum tipo de resíduo.



8. O material está pronto para ser usado.

